




## Инструкция для учащихся по подключению к индукционной системе «Исток»

Индукционная информационная система «Исток» предназначена для передачи голоса преподавателя на слуховой аппарат учащегося. Пользоваться системой «Исток» можно только при наличии слухового аппарата. Для использования системы «Исток» вам необходимо:

1. Сообщить преподавателю о своем желании использовать систему.
2. Переключить слуховой аппарат в режим «Т»(телефон).

Ваш слуховой аппарат оснащен телефонной катушкой. Вы можете активизировать ее кратковременным нажатием на кнопку (примерно в течение 1 секунды, рис. 1.). В этом случае слуховой аппарат сообщает Вам о перемене одним коротким звуковым сигналом.

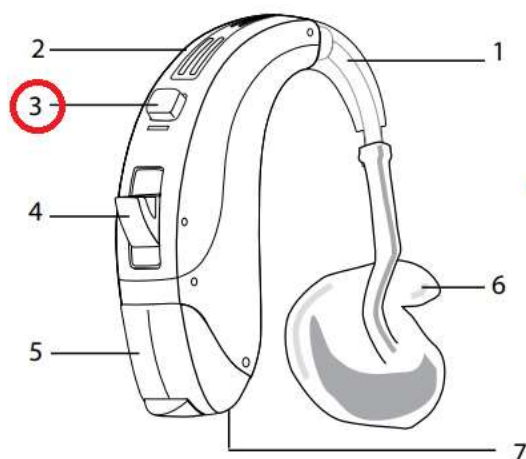

### Условные обозначения

- 1 Рожок
- 2 Микрофоны и защитный фильтр микрофонов
- 3 Кнопка переключения программы
- 4 Регулятор громкости
- 5 Крышка батарейного отсека (выключатель)
- 6 Индивидуальный вкладыш
- 7 Фильтр батарейного отсека

Если в Вашем слуховом аппарате программа «Т» не установлена или не активирована, то установить или активировать ее можно согласно инструкции к Вашему аппарату или обратиться в клинику, где вы получали/приобрели слуховой аппарат, и попросить специалиста добавить вам программу «Т» для прослушивания звука, передаваемого с индукционной петли.

При возникновении сложностей или дополнительных вопросов по использованию системы «Исток», можно обратиться к преподавателю или к работнику информационно-вычислительного центра (каб.215)